

Descripciones generales:

Los dispositivos ortodónticos de alambre se utilizan para nivelar y alinear la anatomía dental, junto con un sistema de brackets que se fija a los dientes de un paciente en un entorno clínico de ortodoncia. Los dispositivos ortodónticos de alambre consisten en arcos de alambre, ligaduras, alambres de retención, auxiliares y muelles en espiral.

Indicaciones de uso:

Los dispositivos ortodónticos de alambre se utilizan para nivelar y alinear la anatomía dental, junto con un sistema de brackets, en el tratamiento de pacientes desde la adolescencia hasta la edad adulta según la evaluación de un odontólogo. Estos dispositivos están destinados a ser prescritos y utilizados solo por dentistas y ortodoncistas.

Uso del producto:

El odontólogo determina los dispositivos, las secciones transversales de los materiales y los tipos de materiales adecuados para el tratamiento de cada paciente. El odontólogo sabe qué dispositivos debe utilizar en cada fase del tratamiento del paciente.

**Número de artículo y descripción del producto:**

Consulte el número de artículo y la descripción del producto en la etiqueta de cada producto.



Indica el código de lote del fabricante para poder identificar el lote o partida.

Información sobre la composición del material:

Para obtener información detallada sobre la composición del material, consulte el sitio web de Acme Monaco o la documentación comercial. Sitio web: www.acmemonaco.com

**Advertencia:**

Los dispositivos ortodónticos de alambre están previstos para un solo uso. La reutilización de un dispositivo ortodóntico de alambre puede perjudicar el rendimiento del producto y presentar un riesgo de lesión para el paciente.

**Advertencia:**

Los dispositivos ortodónticos de alambre se venden sin esterilizar.

**Advertencia:**

Este producto puede contener níquel o cromo (consulte el etiquetado específico del producto). Es conocido que un pequeño porcentaje de la población es alérgico al níquel o al cromo. Para los pacientes con alergias conocidas, seleccione dispositivos que no provoquen una respuesta alérgica. Si se produce una reacción alérgica, retire inmediatamente el dispositivo.

**Advertencia:**

Cáncer y daño reproductivo. Para obtener más información visite www.P65Warnings.ca.gov

Almacenamiento y manipulación:

Los dispositivos ortodónticos de alambre se venden sin esterilizar en paquetes individuales o envasados al por mayor. No se requieren condiciones especiales de almacenamiento. El producto se puede almacenar en el envase suministrado. Evite manipular el producto con fuerza para evitar que se deforme o se dañe el envase del producto. Si el embalaje de los dispositivos está comprometido o los dispositivos están dañados, no deben utilizarse.



Información general:

No se dispone de información que impida el uso de los productos sanitarios orales habituales.

Masticar alimentos duros puede hacer que un dispositivo o un aparato relacionado se rompa, se desprenda o se afloje.

Algunos deportes pueden dañar un dispositivo ortodóntico de alambre o un aparato relacionado, y estos pueden suponer un riesgo de lesiones en el caso de determinados deportes. Consulte a un especialista en ortodoncia para que le recomiende medidas de seguridad.

No se ha evaluado la compatibilidad de los dispositivos ortodónticos de alambre en un entorno de resonancia magnética (RM). Informe siempre al personal de RM o de radiología antes del procedimiento para que se puedan tomar las medidas adecuadas.

Información adicional: Consulte el sitio web de Acme Monaco o la documentación de ventas para conocer las configuraciones de los dispositivos, los materiales, las secciones transversales de los materiales y los datos de rendimiento de los productos. Sitio web: www.acmemonaco.com



Acme Monaco Corporation
75 Winchell Road
New Britain, CT. 06052 EE.UU.
Tel 001.860.224.1349
www.acmemonaco.com



0123



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Alemania